

## راهنمای استفاده از خلوص سنج اکسیژن

### التراسونیک

دستگاه خلوص سنج و دبی سنج التراسونیک برای اندازه گیری درصد اکسیژن و دبی جریان آن برای کاربردهای پزشکی، خانگی و صنعتی طراحی شده است. دقت بالای اندازه گیری، کارایی فوق العاده، عدم نیاز به کالیبراسیون، عدم نیاز به مواد مصرفی، ارتباط هوشمند با گوشی های موبایل از خصوصیات پیشرفته این دستگاه خلوص سنج اکسیژن است.



شلنگ خروجی از لیوان اکسیژنساز را به پورت ورودی گاز اکسیژن خلوص سنج وصل کنید.



اکسیژنساز را روشن کنید. سپس خلوص سنج را روشن کنید و چند ثانیه صبر کنید.



برای اتصال به موبایل در لیست WiFi های موبایل گزینه O2-Analyzer را انتخاب کنید

آویز و پایه دستگاه

ورودی گاز اکسیژن  
کلید روشن و خاموش



اجزای مختلف دستگاه

تجربه کاربری فوق العاده (بدنه محکم با قابلیت کار در شرایط محیطی سخت، عملکرد دقیق، کاربری آسان در محیط های گوناگون پزشکی، خانگی و صنعتی)

امکانات جانبی منحصر بفرد (اندازه گیری فلو، دما و عمر باتری) منبع تغذیه قابل شارژ (نیازی به باتری نیست) سیستم هوشمند امکان اتصال بی سیم به گوشی همراه (گوشی های اندروید و آیفون)

طراحی ظاهری جذاب با قابلیت استفاده در سامانه های مختلف و تجهیزات ثابت و متحرک

استفاده از تکنولوژی پیچیده التراسونیک ویژگیهای زیر را برای دستگاه خلوص سنج اکسیژن فراهم کرده است

پایداری اندازه گیری و عدم نیاز به کالیبراسیون

عدم بکارگیری قطعات مکانیکی لذا طول عمر بیشتر دستگاه

عدم نیاز به مواد مصرفی و بدون هزینه جانبی

عاری از مواد شیمیایی و در نتیجه سازگار با محیط زیست